

# Informations patients

Système de drainage par cathéter pleural  
ou péritonéal

fenik

Brochure d'information pour les patients  
souffrant de troubles causés par un  
épanchement pleural ou une ascite.




## Madame, Monsieur,

Si vous lisez cette information c'est que vous souffrez probablement depuis quelques temps d'une maladie touchant vos organes internes. Un effet secondaire de cette maladie peut être une accumulation de liquide dans l'abdomen (ascite) ou dans la cavité thoracique (épanchement pleural). Votre médecin vous a probablement déjà fait une ou plusieurs ponctions pour éliminer ce liquide. Il existe actuellement une alternative aux ponctions répétitives grâce au système de cathéter permanent tunnélisé PleurX™. Vous pouvez parler de cette option thérapeutique avec votre médecin traitant.

### Le cathéter permanent tunnélisé


Le cathéter permanent tunnélisé est un mince tube de silicone souple qui est placé sous anesthésie locale. Ce cathéter n'a pas besoin d'être remplacé. À son extrémité visible, il est muni d'une valve de sécurité, à laquelle on peut raccorder, pour éliminer le liquide, une poche de recueil (drainage par gravité) ou un réservoir (drainage par aspiration douce) (voir les illustrations ci-dessous).

Des ponctions répétitives à l'hôpital, en clinique ou chez votre médecin ne sont plus nécessaires après la mise en place du cathéter. La gêne provoquée par l'accumulation de liquide est réduite et peut être mieux contrôlée.

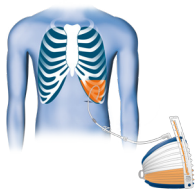

Drainage temporaire

Durée: env. 15 min.

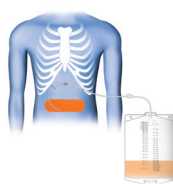

Drainage temporaire

Durée: env. 15 min.

Votre médecin traitant ou un infirmier de l'hôpital / clinique informe notre entreprise, fenik AG, de votre implantation. Notre société, fenik AG, prendra contact avec vous pour planifier une formation à votre domicile. Un spécialiste produits fenik AG vous expliquera en détail comment effectuer le drainage et changer le pansement. Il vous remettra également tous les documents nécessaires.

## **L'utilisation du cathéter permanent tunnélisé à domicile**

Après le drainage, le cathéter est placé sous un pansement adapté. Il ne se voit pas sous vos vêtements. Chaque kit de drainage contient également un pansement auto-adhésif transparent que l'on colle sur le pansement pour le rendre étanche. Comme ça, vous pouvez prendre une douche en toute sécurité.

Ce cathéter vous permet une grande liberté de mouvement. Selon la prescription du médecin ou selon vos besoins, lors d'un drainage temporaire, le système de drainage sera connecté à votre cathéter durant 10 à 20 minutes. Si après quelques semaines, il n'y a plus d'accumulation de liquide, le cathéter permanent peut être retiré par votre médecin sous anesthésie locale.

Les kits de drainage sont partiellement remboursés par votre assurance maladie. Les kits de drainage sont envoyés chez vous par la poste sans frais de port.



Source: fotomed KSW



fenik